


### La notice d'utilisation et d'entretien

**La prothèse est maintenue en place dans la cavité par la profondeur dans le culs de sacs et la pression musculaire des paupières. Sauf indication particulière de votre oculariste, il est conseillé de retirer la prothèse le moins possible.**

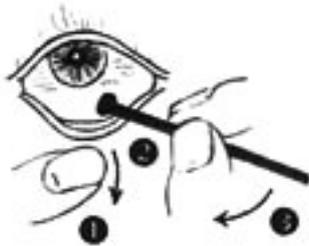


#### Enlever la prothèse

- Abaisser légèrement la paupière inférieure et regarder vers le haut pour dégager la base de la prothèse.  
*Pour faciliter cette manipulation, il est conseillé d'utiliser une petite ventouse que l'on applique directement sur la prothèse.*

#### Remettre la prothèse

- Soulever largement la paupière supérieure en plaçant les cils avec le pouce contre l'arcade sourcillière en regardant vers le haut.
- Engager profondément, de l'autre main, la prothèse mouillée dans la cavité en la glissant sous la paupière supérieure, en regardant vers le bas.

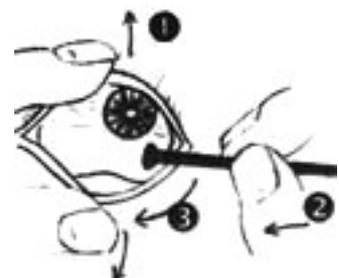

- Abaisser la paupière inférieure en maintenant la prothèse en place.  
*Pour éviter le déplacement de la prothèse, il est conseillé d'essuyer raisonnablement l'oeil, et toujours de la tempe vers le nez, ou par attouchements successifs.*

### **Entretien de la prothèse**

Le nettoyage quotidien doit se limiter à essuyer superficiellement avec une compresse légèrement humidifiée d'une solution d'entretien pour prothèses. Pour éviter allergies et irritations, il est quelquefois indiqué de retirer la prothèse pour un traitement d'entretien avec des produits spécifiques destinés à éliminer les dépôts protéiques.

Le polissage de la prothèse par votre oculariste est nécessaire en moyenne une à deux fois par an. Il permet de limiter l'irritation des paupières en supprimant les dépôts et rayures qui se forment à la surface de la prothèse. *Le polissage est pris en charge par les Caisses d'Assurances Maladie dans la limite de deux par an.*